


KRATKI NAPOTKI ZA PRENOS PODATKOV V PROGRAMSKO OPREMO CARELINK - v. 14.01

Programska oprema **CareLink Personal** je brezplačna spletna aplikacija v slovenskem jeziku. Omogoča prenos podatkov iz inzulinske črpalke in sistema za neprekinjeno merjenje glukoze na vaš računalnik. Poročilo nato lahko delite z vašim zdravnikom. Napotki prikazani na zaslonih se lahko prikazujejo v različnih jezikih, odvisno od nastavitev vašega računalnika.

Dostop in ustvarjanje računa

Za prenos podatkov potrebujete merilnik, ki je obenem tudi vmesnik za prenos podatkov, inzulinsko črpalko in računalnik z dostopom do spleta.

- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link** za prenos iz črpalke **Paradigm VEO**. 
- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link 2.4** za prenos iz črpalke **MiniMed 640G** in **MiniMed 670G**. 




Ustvarjanje uporabniškega računa

Če imate račun že ustvarjen, izberite državo »Slovenija« in jezik »Slovenščina« kliknite »Nadaljuj«, vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste si ga nastavili in nadaljujte na drugi strani z navodili za odčitek):

1. **Zaženite** spletni brskalnik.
Namig: ikona, ki jo iščete na računalniku



2. Pojdite na carelink.minimed.eu

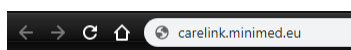

3. Izberite državo »**Slovenija**« in jezik »**Slovenščina**«.
4. Kliknite »**Ustvarite račun**«. Izberite državo **Slovenija** in jezik **slovenščina**, kliknite »**Naprej**«.
5. Izberite vrsto računa **Bolnik** ali **Druga oseba** in kliknite »**Naprej**«.
6. Izrazite soglasje za obdelavo podatkov in uporabo piškotkov: 4-krat zapored »**Da**« in »**Naprej**«.
7. Izberite **uporabniško ime in geslo**, geslo ponovite in vnesite svoj **elektronski naslov**.
8. Izpolnite **obrazec za včlanitev** s svojimi podatki, odključajte možnost »**Nisem robot**« (po potrebi izpolnite tudi preverjanje reCaptcha) in kliknite »**Pošlji**«.

9. Na vaš e-poštni naslov je bila poslana **potrditvena koda**. V vaši elektronski pošti poiščite sporočilo Potrditvena koda za CareLink™ Personal.

Kodo vnesite v okence, ki je prikazano na spletni strani Carelink.

Potrdite svojo identiteto

Potrditvena koda je bila poslana na vaš e-poštni naslov
vaš.email@nekaj.si

10. Včlanitev je končana, kliknite »**Nadaljuj**«.

11. Zdaj se prijavite v svoj račun CareLink Personal z izbranim uporabniškim imenom in geslom.

POMEMBNO: izbrano uporabniško ime, elektronski naslov in geslo si zapišite ter varno shranite.

Potrditvena koda

Odčitavanje podatkov iz črpalke

Povezovalne naprave (merilnik) še ne vklopite v računalnik.

1. Izberite »**Prenesi zdaj**«.

Opomba: Pred prvim odčitkom je treba namestiti aplikacijo Uploader in slediti napotkom na zaslonu. Če imate aplikacijo Uploader že nameščeno, preskočite koraka a) in b).

 Prenesi zdaj

- a) Prikazalo se vam bo okno »Orodje za prenos podatkov CareLink«. Kliknite »**Prenesi namestitveni program orodja za prenos podatkov CareLink™**«.

 Prenesi namestitveni program orodja za prenos podatkov CareLink™

- b) Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo Uploader.

2. Prikazalo se bo okno »**Odpri Carelink Launcher**«, kliknite **odpri**.

Opomba: v različnih spletnih brskalnikih se lahko prikazuje različno. Če odčitka NE delate prvič, preskočite koraka a) in b).

Open CareLink Launcher?

<https://carelink.minimed.eu> wants to open this application.

Open CareLink Launcher

Cancel

- a) Kliknite »**Dodaj novo napravo**«.

- b) Izberite **vrsto naprave** (izberite obliko naprave, ki jo imate) in kliknite »**Naprej**«.



Merilnik



Črpalka MiniMed™



Črpalka Paradigm™

c) **Potrdite** izbrano vrsto naprave.



Serijski MiniMed™ 600

d) **Vklopite** povezovalno napravo v računalnik in počakajte, da jo sistem samodejno prepozna.

e) Izberite **časovni razpon** za prenos podatkov in kliknite »**Naprej**«.

f) **Pripravite napravo** za prenos podatkov, kot je napisano na zaslonu.

g) **Vnesite serijsko številko** na način, kot je prikazan na zaslonu in kliknite »**Naprej**«. Počakajte, da se prenos konča.

h) Po uspešnem prenosu kliknite »**Izhod**«.



Prenos je uspel

Paradigm™ 522


773574

08/07/2020


[Izhod](#)

Ustvarjanje poročil in pošiljanje zdravniku

1. Kliknite zavihek »**Poročila**«.

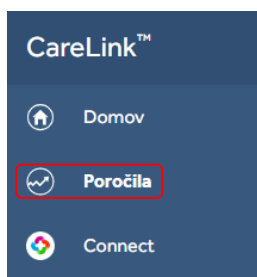

2. Izberite **obdobje zelenega prikaza podatkov** (privzeto 7, 14, 30 dni ali razpon po meri od / do).
Opomba: Svetujemo izbiro podatkov za obdobje 30 dni, razen, če ste s strani svojega diabetologa dobili drugačne napotke.

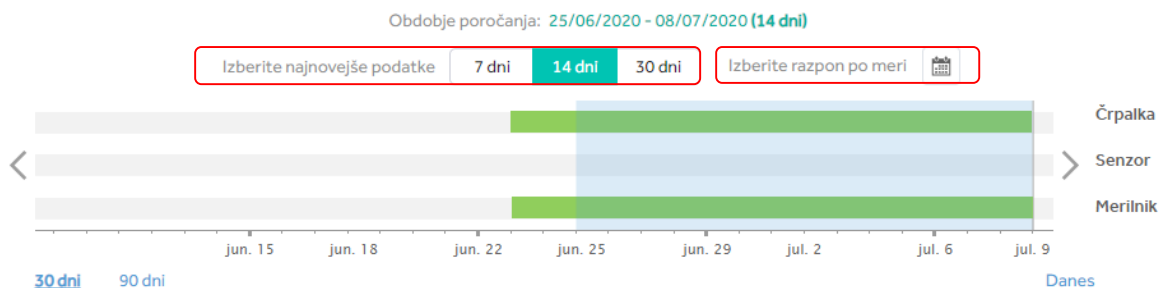


3. Izberite **želena poročila**. Neoznačena poročila so bela in brez kljukice, označena poročila so zelena in s kljukico.


Opomba: Svetujemo, da izberete vsa poročila, ki so na voljo.

Uporabniki MiniMed 670G v poročilu »Ocena in napredek« izberite tudi **obdobje za primerjavo**.

Svetujemo 14 dni ali 1 mesec.

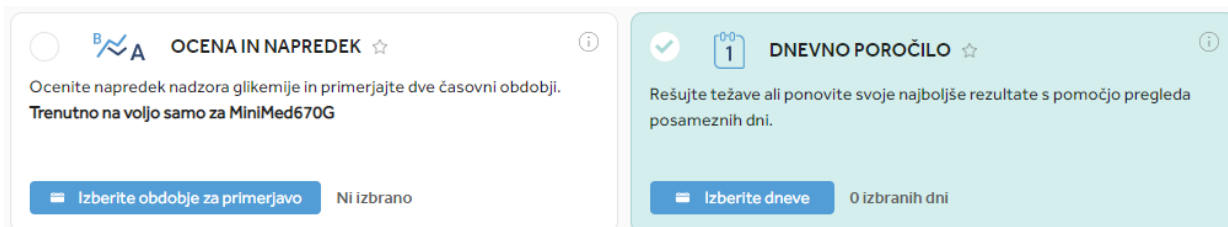

Opomba: Pri izbiri dnevnih poročil je treba označiti posamezne datume.

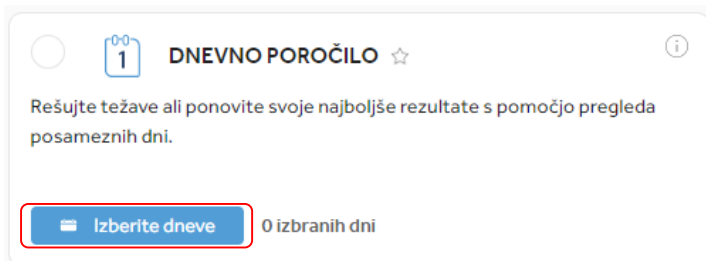

4. Kliknite »**Ustvarjanje poročil**« v desnem zgornjem kotu in datoteko shranite na poljubno mesto na svojem računalniku.

Poročilo, glede na dogovor z zdravnikom, prinesite (na USB ključku ali v tiskani obliki) s seboj na pregled ali ga kot priponko pošljite na elektronski naslov ambulante.

Več informacij in tehnična pomoč: podpora@zaloker-zaloker.si.