


Novosti

Sistem MiniMed™ 780G, programska oprema 6.42

Spremembe bodo na voljo po končani posodobitvi programske opreme na različico 6.42.

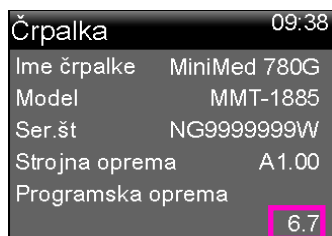

Poiščite svojo trenutno različico programske opreme

1. Na začetnem zaslonu pritisnite puščico navzgor, da odprete zaslon Stanje.
2. Izberite možnost Črpalka.
3. Pritisnite puščico navzdol, da najdete podatek Programska oprema (nahaja se čisto na dnu).

Če posodabljate s programske opreme različice 6.7, preberite 1. in 2. razdelek.
Če posodabljate s programske opreme različice 6.23, preberite 2. razdelek.

1. razdelek




Funkcija Bolus omogoča ročni vnos GK†

Manj korakov za vnos vrednosti GK v črpalko. Meritev GK je zdaj mogoče vnesti v funkcijo Bolus Wizard™ in Bolus SmartGuard™.




Pasica priprave senzorja

Med Pripravo senzorja se na začetnem zaslonu prikaže odštevalnik.

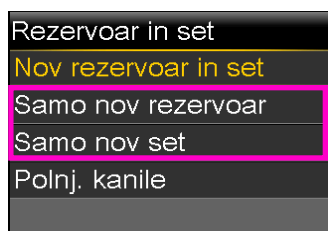


Menjava rezervoarja in seta

Nove možnosti omogočajo menjavo samo rezervoarja ali samo seta.

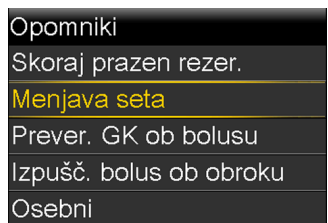

Opomnik "Menjava seta"

Infuzijski set in rezervoar se standardno zamenjata vsaka 2 do 3 dni. Infuzijski set in rezervoar Extended™ družbe Medtronic lahko nosite do 7 dni. Možnost trajanja uporabe vključuje od 2 do 7 dni.

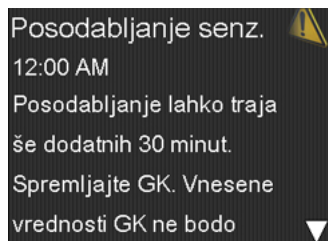

Sporočilo o posodabljanju senzorja

"Posodabljanje senzorja" je način, ki potrjuje zanesljivost senzorja; večina senzorjev bo nadaljevala z normalnim delovanjem brez vašega posredovanja. Sporočilo zdaj navaja čas, ki bo potreben za posodabljanje senzorja.

2. razdelek



En dan življenjske dobe senzorja




Senzor je potekel

Ikone življenjske dobe senzorja

Prikažejo se na začetnem zaslonu.

Na zaslonu Stanje lahko kadarkoli preverite, koliko dni življenjske dobe senzorja je še preostalo.

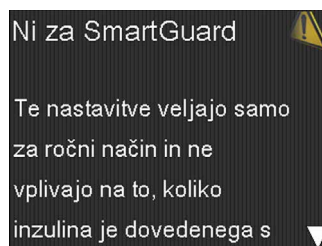

Ni za SmartGuard™

Opomnik, ki sporoča, da prilagoditve Nastavitve bazalnega vzorca in nastavitve Maksimalnega bazalnega odmerka vplivajo na dovajanje inzulina le v ročnem načinu. Te nastavitve ne vplivajo na funkcijo SmartGuard™.



Kontrolni seznam SmartGuard™

Posodobljeni kontrolni seznam vsebuje več podrobnosti o tem, kaj je potrebno za vstop v funkcijo SmartGuard™.



Nastavitev zelo visokega bazalnega odmerka

Ko sistem izračuna, da bo Bazalni vzorec v načinu Ročno dovajal več inzulina, kot ga običajno potrebuje uporabnik, se prikaže sporočilo.

Vstavljanje in seznanjanje senzorja Simplera Sync™

Vse v enem: aplikator, oddajnik in senzor.

Brez odvzemov krvi iz blazinice prsta v funkciji SmartGuard™‡


Če boste začeli uporabljati senzor Simplera Sync™, sledite spodnjim navodilom.

Mesta vstavitve

Starosti 2-17 let

Zgornji del zadnjice

Zadnja stran nadlakti

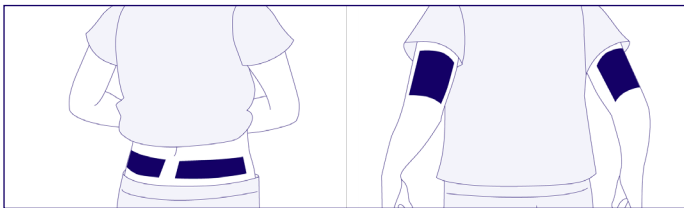

Glede vstavitve na trebuh pri starostni skupini 2-17 let ni bila podana ocena glede točnosti.

Starosti 18 let in več

Zadnja stran nadlakti




Glede vstavitve na trebuh in zgornji del zadnjice pri starostni skupini 18 let in več ni bila podana ocena glede točnosti.

Vstavev senzorja



1. Izberite in očistite mesto vstavitve.

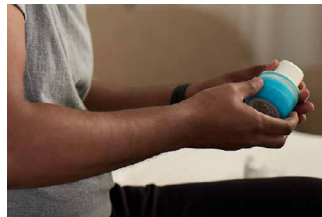

2. Preglejte aplikator, da se prepričate, da je tesnilo nedotaknjeno, nato pa pokrovček zavrtite, da ga odprete.



3. Aplikator močno in hitro pritisnite na izbrano mesto vstavitve, dokler ne zaslišite klika.




4. S prstom zgladite lepilni trak

Preklic seznanitve trenutne naprave CGM

1. Pojdite v **Glavni meni** 2. Izberite **Seznanjene naprave** 3. **Izberite** številko naprave CGM, ki ustreza vašemu oddajniku Guardian™ 4. Izberite **Prekliči seznanitev** in potrdite tako, da izberete **Da**

Seznanjanje senzorja

Pri senzorju Simplera Sync™ preklic seznanitve ni potreben. Ko seznanite novi senzor, se seznanitev s starim samodejno prekine.

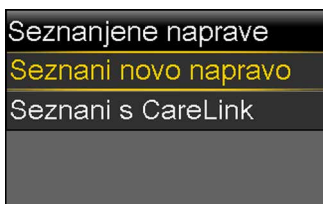


Pojdite v **Glavni meni** >
Seznanjene **naprave** >
Seznani novo napravo



Izberite **pripomoček CGM, ki se ujema s serijsko številko**, navedeno na vrhu aplikatorja



Preverite, ali se koda na zaslonu ujema s številko **CODE** (KODA) na vrhu oznake aplikatorja.

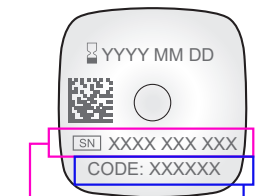

SN (Ser. št.):
XXXX-XXX-XXX
CODE (KODA):
XXX-XXX

Opomba: Če senzor Simplera Sync™ ni seznanjen s črpalko v 20 minutah po odstranitvi pokrovčka z aplikatorja, ročno vnesite številko CODE (KODA) in izberite možnost **Potrdi**, da seznanite senzor.

† GK = glukoza v krvi

‡ V ročnem načinu in za vstop v SmartGuard je potrebna meritev z vbodom v prst. Če se simptomi ne ujemajo z opozorili in meritvami, uporabite odvzemi krvi iz blazinice prsta. Glejte uporabniški priročnik.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije v tej knjižici ne predstavljajo zdravniškega nasveta in jih ne smete uporabiti kot nadomestek pogovora s svojim zdravnikom. O indikacijah, kontraindikacijah, opozorilih, previdnostnih ukrepih, potencialnih neželenih učinkih in morebitnih dodatnih informacijah se pogovorite s svojim zdravnikom.

EMEA-DBA-2500387 © 2025 Medtronic. MiniMed in logotip MiniMed sta blagovni znamki družbe Medtronic MiniMed, Inc.™
™* Blagovne znamke tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke podjetja, ki je v lasti družbe Medtronic.